

HOE GEBRUIK IK EEN S-CAPEPOD EVACUATIEDOEK?

INSTRUCTIEBOEKJE VOOR
S-CAPEPOD
EVACUATIEDOEK



s-capepod[®]
THE EVACUATION SOLUTION

BEKIJK WWW.S-CAPEPOD.COM VOOR MEER INFORMATIE

Wat is de S-CAPEPOD?

Met het evacuatieboek S-CAPEPOD kunt u bedlegerige cliënten evacueren in een noodsituatie. Dankzij het eenvoudige design maakt u in zo'n 30 seconden een cliënt klaar voor evacuatie. Snel, eenvoudig & onmisbaar bij noodsituaties.

Honderden organisaties gebruiken S-CAPEPOD in een noodsituatie.

Antes

 **diakonessenhuis**
Kwaliteit met een hart

 **laurentius**

 **UZ** Universitair Ziekenhuis Gent

isala





STAP 1

Installeer de S-CAPEPOD tussen het matras en het frame van het bed. Doe dit zorgvuldig. [Klik hier om de installatievideo te bekijken >>](#)



STAP 2

Trek het rechteruiteinde van de S-CAPEPOD onder het matras vandaan.



STAP 3

Haal het linkeruiteinde onder de matras
vandaan.



STAP 4

Trek beide uiteinden krachtig naar elkaar toe en kleef het klittenband van het rechteruiteinde op dat van het linkeruiteinde.



STAP 5

Haal het voeteneinde van onder het matras en bevestig het met klittenband bovenop de andere reeds samengebrachte uiteinden.



STAP 6

Pak de lus aan het voeteinde van de S-CAPEPOD vast en draai nu de matras met de bedlegerige langzaam, circa 80 graden op het frame van het bed en hou de matras horizontaal terwijl u de matras er langzaam

vanaf trekt. Laat de matras rustig zakken als de bedlegerige met zijn of haar billen over het frame van het bed is. Trek nu langzaam door tot dat de bedlegerige met zijn of haar matras geheel op de grond ligt.



STAP 7

De persoon wordt al slepend geëvacueerd.



STAP 8

Indien u zich op een verdieping bevindt, moet u via een trap naar beneden omdat u tijdens een brand de eventueel aanwezige lift niet mag gebruiken. Doe dit beheerst. Ga zelf een paar treden lager staan en trek de

bedlegerige horizontaal naar u toe.



STAP 9

Pas op het moment dat de cliënt met de billen over het trapgat is, laat u de matras langzaam zakken. Zorg dat u met een hand de leuning blijft vasthouden en dat u steeds contact houdt met de matras.



STAP 10

Indien u een brede trap heeft, kunt u op het moment dat u de bedlegerige laat zakken op zij gaan staan en de lus los laten. De bedlegerige glijdt nu van zelf naar beneden. Loop er achteraan en pak daarna de trek lus

weer op en verplaats de persoon naar een veilige zone.



STAP 11

Eventueel kan een tweede hulpverlener door middel van de lus aan de hoofdzijde meehelpen om te sturen en te remmen. De extra lus zit ingesloten tussen de matras en de S-CAPEPOD.