

WWW.S-CAPEPLUS.COM

HANDLEIDING MET FOTO'S

Evacuatiematras voor baby'tjes



S-CAPE KIDS
BABY & INFANT EVACUATION



Een levensreddend middel voor een kwetsbare groep

Baby'tjes kunnen niet zelfstandig vluchten tijdens een calamiteit. Daarom hebben medewerkers van kinderafdelingen een hulpmiddel nodig om meerdere baby's tegelijk te evacueren.

4 baby'tjes evacueren met één persoon lijkt misschien onmogelijk. Het tegendeel is waar.

S-CAPEKIDS kan een wezenlijk verschil maken voor de veiligheid van baby'tjes in kinderdagverblijven en kinderafdelingen in ziekenhuizen. Het is snel, veilig, comfortabel.

Het is tijd om kennis te maken met
S-CAPEKIDS evacuatiematras!



Step 1

Haal de S-CAPEKIDS uit de groene Wall Cover.



Stap 2

De S-CAPEKIDS beschikt over vier compartimenten. Zorg dat de compartimenten omhoog liggen. In ieder compartiment kunt u één baby/peuter fixeren.



Stap 3

Ieder compartiment bestaat uit drie verstelbare elementen:

Een klein broekje, een head block en een bandje om de head blocks te verbinden.



Stap 4

Open de flap van het compartiment. Plaats de baby op het matras.



Stap 5

Plaats de benen van de baby/peuter door de opening van het broekje.



Stap 6

De twee delen van het hoofdblok worden naast het hoofd van de baby/peuter geplaatst.



Stap 7

Door middel van het bandje worden de twee delen van het hoofdblok met elkaar verbonden. Hierdoor fixeert u het hoofdje.



Stap 8

Sluit de flap zodat de baby/peuter in een soort cocon ligt.



Stap 9

Volg de bovengenoemde stappen voor de resterende compartimenten, zodat er vier kinderen op het matras liggen.



Stap 10

Horizontale verplaatsing kan gedaan worden met één of twee hulpverleners.



Stap 11

Bij een evacuatie over de trap kunt u dit met één of twee hulpverleners doen. De persoon die onderaan de trap staat, zorgt dat het onderbeen constant contact houdt met de S-CAPEKIDS. Hierna kunt u stap-voor-stap naar beneden.



Stap 12

De persoon die de trekklus aan het hoofdeinde bediend, stuurt mee wanneer nodig.



**Onze oplossingen kunnen het
verschil tijdens noodsituaties**

BEDANKT.

DON'T HESITATE, USE S-CAPE TO EVACUATE.