

HOE GEBRUIK IK EEN S-CAPEPLUS EVACUATIEMATRAS?

INSTRUCTIEBOEKJE VOOR  
**S-CAPEPLUS**  
EVACUATIEMATRAS

**S-CAPEPLUS**  
THE EVACUATION SOLUTION

BEKIJK [WWW.S-CAPEPLUS.COM](http://WWW.S-CAPEPLUS.COM) VOOR MEER INFORMATIE

# Wat is de S-CAPEPLUS?

Met het evacuatiematras S-CAPEPLUS zorgt u ervoor dat niemand achter blijft tijdens een noodgeval. Met de S-CAPEPLUS kunnen hulpverleners snel handelen en mindervaliden, zoals rolstoelgebruikers, in veiligheid brengen tijdens een evacuatie. Ook via de trap.

**S-CAPEPLUS**  
THE EVACUATION SOLUTION

Honderden organisaties gebruiken S-CAPEPLUS in een noodsituatie.

**Antes**

**Isala**




  
**CROWNE PLAZA**  
HOTELS & RESORTS

**UZ**

Universitair Ziekenhuis Gent



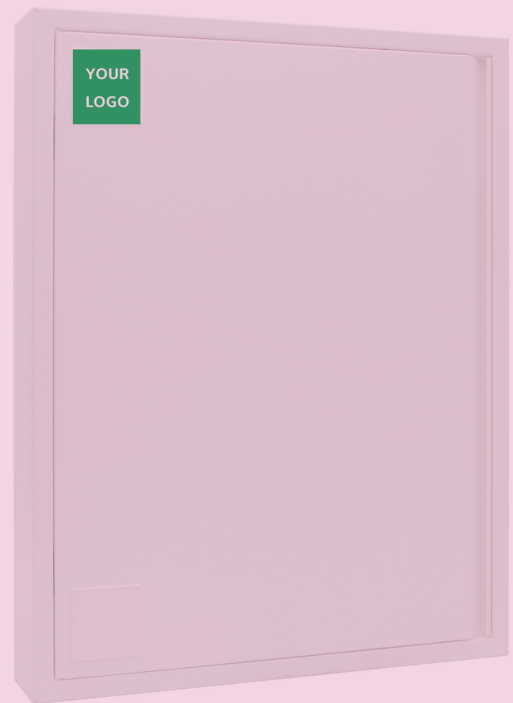

## STAP 1

---

Haal de S-CAPEPLUS uit de draagtas, de Wall Cover of de opbergkast





## STAP 2

---

Sla alle flappen open en maak de positioneringsband los



## STAP 3

---

Leg de hulpbehoevende op het midden van de matras. Plaats de positioneringsband strak rond de romp van de persoon. Haal de band door de ring aan de rechterzijde.

Fixeer deze met het klittenband. Plaats de armen langs het lichaam en boven de positioneringsband.



## STAP 4

---

Trek nu de lange flappen krachtig naar elkaar toe. Verbind en kleef het klittenband aan de rechterflap met het klittenband op de linkerflap. Sluit zo strak mogelijk.



## STAP 5

---

Sluit de flap aan het voeteinde. Doe dit ook zo strak mogelijk.



---

De hulpbehoevende ligt nu stevig ingepakt op de S-CAPEPLUS en is klaar om de evacuatie voort te zetten.





**S-CAPE PLUS**  
THE EVACUATION SOLUTION

## STAP 6

---

Pak nu de treklius aan het voeteneinde goed vast om de hulpbehoevende slepend te evacueren. Een tweede hulpverlener kan de lus aan het hoofdeinde gebruiken om in bochten eenvoudiger en sneller te sturen.



## STAP 7

---

U kunt de benen van de hulpbehoevende omhoog liften. Hierdoor kunt u razendsnel draaien en scherpe hoeken in een gang of op de trap nemen.



## STAP 8

---

Indien u zich op een verdieping bevindt, moet u via een trap naar beneden omdat u tijdens een brand de eventueel aanwezige lift niet mag gebruiken. Doe dit beheerst. Ga zelf een paar treden lager staan en trek de Hulpbehoevende horizontaal naar u toe.

Op het moment dat de hulpbehoevende met de billen over het trapgat gaat, laat u het evacuatiematras rustig zakken. Hou met uw been contact met de S-CAPEPLUS en zorg dat u met een hand de leuning vasthoudt.



## STAP 9

Gebruik een tweede hulpverlener om de lus aan het hoofdeinde vast te houden. Deze zorgt voor de nodige remming bij het

afdalende via de trap.

## STAP 10

---

U kunt het evacuatiematras ook zelfstandig bedienen. Zorg in alle tijden dat uw been contact houdt met de S-CAPEPLUS en dat u met een hand de leuning blijft vasthouden.

Neem iedere trede van de trapgevel wanneer u naar beneden gaat. doe dit stapvoets. Overschat uzelf nooit, een evacuatie via de trap kan gevaarlijk zijn. Bij enige twijfel hierover, vraag een tweede hulpverlener om assistentie of laat het aan anderen over.



Don't hesitate, use  
S-CAPEPLUS to evacuate.

IN CASE  
OF FIRE  
USE STAIRS



HELP!

MEER WETEN?

Bekijk hier de demovideo >>